

# serumstaander

De serumstaander gebruik je om je infuus of serum op te hangen. De serumstaander kan je thuis makkelijk naast je bed plaatsen. Dit helpt om thuis sneller te revalideren. Door de vijf wieltjes kan je ook eenvoudig een verplaatsing naar je zetel of stoel maken.

## wat huur je bij Goed?

serumstaander

## hoe stel je de ruggensteun in?

- 1 Plaats de serumstaander in de nabijheid van je bed op een vlakke ondergrond en aan de kant van je infuus.
- 2 Stel de juiste hoogte in door de sterknop los te draaien en de bovenkant omhoog te schuiven. Kies een hoogte waarbij je nog comfortabel de infuuszak kan bereiken. Draai de sterknop op terug vast als de serumstaander hoog genoeg staat.
- 3 Hang de infuuszak aan een van de vier voorziene haakjes.
- 4 Wil je je van je bed naar een zetel of stoel verplaatsen? Stap uit je bed aan de kant van de serumstaander. Sta voorzichtig rechtop. Neem de serumstaander vast. Via de wieltjes kan je hem makkelijk naar je stoel meenemen.

## onderhoud

Je kan de serumstaander met een licht vochtige doek reinigen. Vermijd dat er vocht in de buizen doorsijpelt om roestvorming te voorkomen.



# Goed is er voor iedereen

## Goed thuiszorgwinkel

- 🌐 [www.goed.be/thuiszorgwinkel](http://www.goed.be/thuiszorgwinkel)
- ☎️ 03 205 69 29
- 📦 uitleendienst: [www.goed.be/uitleendienst](http://www.goed.be/uitleendienst)

## onze webshop is altijd open

- 🛒 Bestel en reserveer 24/7 op [www.goed.be/webshop](http://www.goed.be/webshop). Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

## maak snel en gemakkelijk een afspraak

- 🌐 [www.goed.be/afspraak](http://www.goed.be/afspraak)
- ☎️ 03 205 69 29

- 🗣️ **Vragen over het juiste gebruik?**  
**Bel ons op 03 205 69 29.**  
**We helpen je graag verder.**