



# montage en gebruikerstips

elektrisch hoog-laagbed  
Vermeiren 1030

Bedankt om via Goed een hoog-laagbed te ontlenen. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om het bed op een correcte manier te monteren en te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren indien je bijkomende vragen hebt.





## bedienen voethoogte




Omhoog: trek het handvat naar boven en breng het voeteneinde tot op de gewenste hoogte.




Omlaag: trek het handvat omlaag tot het niet meer verder kan en laat het dan zakken.

## bedienen motoren

Het gehele bed omhoog of omlaag verstellen.

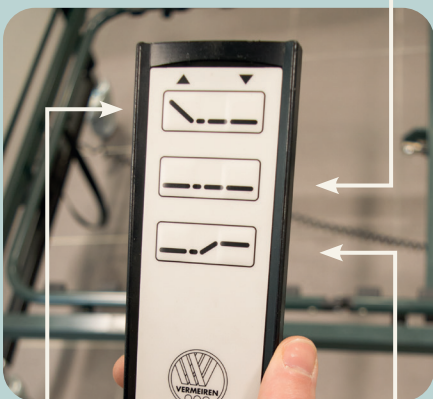

Hoofdeinde schuin omhoog oprichten.

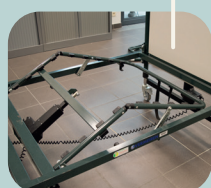

Knieën omhoog brengen (laten knikken).


## stap 1 montage bedbodem



Plaats 2 delen van de bedbodem op hun kant op de grond en schuif beide helften in elkaar.



Draai de 2 zwarte draaiknoppen links en rechts stevig vast.

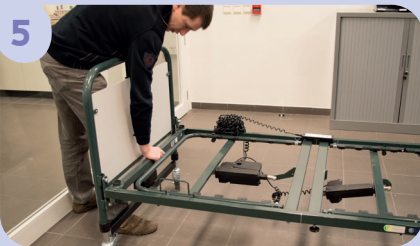

Plaats het hoofdstuk voor de voorkant van het bed. Laat de koppelpennen van de bedbodem in de gleuven glijden.




Het hoofdstuk zet zichzelf vast in de sleuf. Doe hetzelfde aan het voeteneinde van het bed.


## stap 2 montage elektrische aansluitingen



Het bed heeft meerdere motoren die worden aangesloten met fiches op de verdeeldoos onder het hoofdeinde.

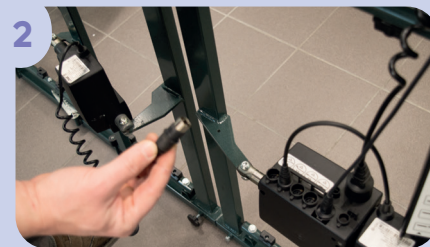

Neem de draad die vastzit aan de motor van de knieknik.

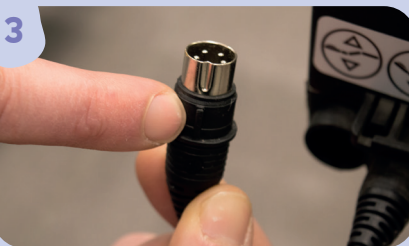

Op de stekker zie je een markering: een opstaand randje en een gleuf in het metaal.



Steek de stekker met de markering naar beneden in de overeenkomstige ingang.



Doe dit voor alle fiches.



Let op dat alle draden onder het bed volledig los hangen.





3  
Leg de bedbodem op de grond met de motoren naar onderen.



4  
Duw met je voet de remmen van de 2 wielen van het hoofd- en voetstuk naar beneden vast.



Maak alle transportklemmen los voordat je het bed gebruikt. Trek de klem naar achteren.



Draai hem 180° om naar beneden. Doe dit voor alle 3de klemmen.

## stap 3 montage latten




1  
Druk de latten over de zwarte toppen van de bedbodem.



2  
Ga door totdat in alle zwarte blokjes een lat zit.

## overzicht van alle aansluitingen

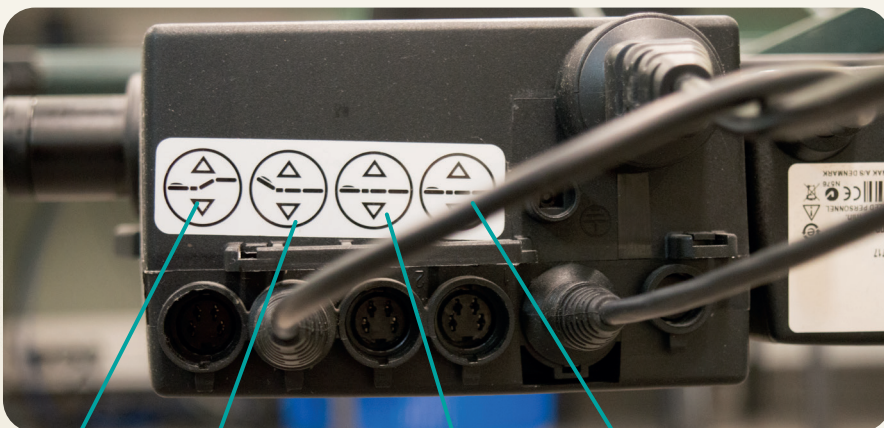

aansluiting voor oprichten van het hoofdeinde

aansluiting voor de hoog-laag-functie aan het hoofdeinde

aansluiting voor oprichten van de knieknik

aansluiting voor de hoog-laag-functie aan het voeteneinde

## montage optrekhelp



1  
Steek de onderkant van de optrekhelp in het linker- of rechtergat aan het hoofdeinde. Kies de kant langs waar de gebruiker het bed in-/uitkomt.



2  
Schuif het zilveren oog van de triangel over de stang. Steek de pin in het gewenste gat. De plaats kan je zelf instellen. Ook de lengte van het lint is instelbaar.

## montage zijsponden



1  
Schuif de zwarte haken met de draaddoppen naar beneden over de balk met de rechte kant aan het hoofdeinde.



2  
Zorg dat de schuine zijde aan het voeteinde van het bed zit. Draai beide draaddoppen vast.

## bediening zijsponden



Trek de zwarte dop naar beneden en duw tegelijkertijd het hek schuin omlaag of omhoog.

# tips & tricks

## praktische tips voor gebruik

- Heb je een kwetsbare vloer? Let op voor beschadigingen bij “montage/stap 1”.
- Zet de bedbodem altijd volledig vlak wanneer je iemand verzorgt in bed.
- Zet het bed altijd op minstens 2 remmen vast.
- Laat geen tweede persoon op het bed zitten als het bed niet volledig vlak is.
- Draai de wielen altijd onder het bed zodat je er niet tegen kan stoten of over kan vallen.
- Hang de handbediening op aan de optrekhelp of binnen handbereik van de gebruiker.
- Zet het bed niet vlak onder de vensterbank.
- Voor lange personen kan je het bed langer maken met een bedverlenger.
- Om het bed te demonteren, pas je de handelingen in omgekeerde volgorde toe.

## wat te doen bij problemen

### Kijk zeer goed de volgende zaken na:

- Zit de stekker nog diep genoeg in het stopcontact?
- Staat er spanning op het stopcontact? Is de stop in je meterkast afgesprongen?
- Zitten de fiches in de verdeeldoos onder het bed nog diep genoeg in hun aansluitingen?
- Zitten er draden gekneld? Of zijn er draden beschadigd? Zo ja, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de uitleendienst.

**Toch nog een  
probleem of vraag?  
Bel naar het nummer  
03 205 69 29.**

# hier al aan gedacht?


## meer comfort

- ergonomische matras
- ergonomisch hoofdkussen
- antidecubitus wisseldrukmatras
- all-in-1 dekbed



## gemakkelijker verzorgen

- glijdlaken
- matrasbeschermer
- bedpan
- wet wash gloves (wassen zonder water)

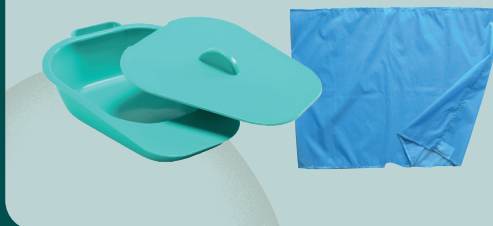

## Goed thuiszorgwinkel

[www.goed.be/thuiszorgwinkel](http://www.goed.be/thuiszorgwinkel)  
03 205 69 29

reservatie uitleenmateriaal via  
[www.goed.be/uitleendienst](http://www.goed.be/uitleendienst)

## onze webshop is altijd open

Bestel en reserveer 24/7  
op [www.goed.be/webshop](http://www.goed.be/webshop).  
Haal je bestelling af bij Goed thuiszorgwinkel  
of laat ze thuis leveren.

meer info op [www.goed.be](http://www.goed.be)

# goed

samen sterk in het leven